


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐỐT LẠNH TỬ CUNG CR – 201

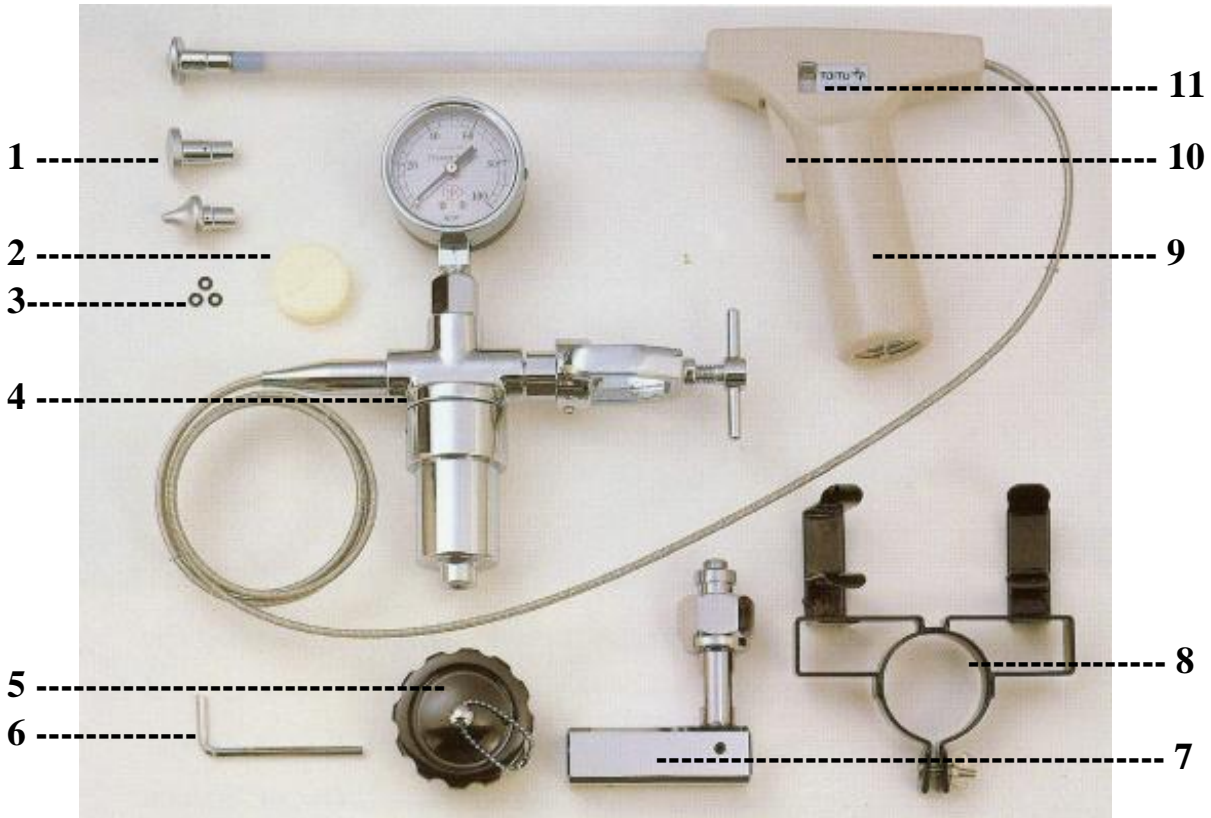

I. DIỄN GIẢI NHỮNG LINH KIỆN MÁY

1. Các loại đầu đốt lạnh tử cung tùy theo từng trường hợp
2. Mỡ bôi trơn các đầu đốt lạnh tử cung
3. Ron dự phòng dùng khi thay thế các loại đầu đốt lạnh tử cung
4. Van tự động điều chỉnh áp lực khí kèm theo đồng hồ theo dõi
5. Núm xoay dự phòng dùng để vận mở / khóa bình khí sử dụng đốt lạnh
6. Lược giác dùng để điều chỉnh áp lực khí ở van điều áp theo yêu cầu sử dụng riêng
7. Khớp nối dùng để kết nối giữa van điều áp tự động và bình khí sử dụng đốt lạnh
8. Giá đỡ súng đốt lạnh khi không dùng đến

[Type here]

VPĐD NIPON CORPORATION TẠI TPHCM
Lầu 3, Cao Ốc Tuổi Trẻ, 60a Hoàng Văn Thụ, P9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
ĐT : 028.38448172 FAX : 028.39971661

9. Súng đốt lạnh tử cung

10. Cò súng dùng để đốt lạnh tử cung khi bóp cò

11. Công tắc khóa dùng để đóng ngắt việc sử dụng súng đốt lạnh

II. QUY TRÌNH SỬ DỤNG MÁY ĐỐT LẠNH TỬ CUNG



1. Kiểm tra súng đốt lạnh, đảm bảo đã được kết nối hoàn chỉnh với bình khí (CO₂)

2. Mở van bình khí đốt lạnh

3. Kiểm tra đồng hồ áp lực, đảm bảo khí cung cấp vào được đầy đủ

4. Chọn đầu đốt lạnh thích hợp với từng bệnh nhân

5. Đưa đầu súng vào vị trí cần đốt lạnh

[Type here]

VPĐD NIPON CORPORATION TẠI TPHCM

Lầu 3, Cao Ốc Tuổi Trẻ, 60a Hoàng Văn Thụ, P9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

ĐT : 028.38448172

FAX : 028.39971661

- 6. Mở công tắc khóa để súng sẵn sàng được sử dụng**
- 7. Bóp cò súng để đốt lạnh theo từng khoảng thời gian nhất định**
- 8. Khi sử dụng xong, nhớ đóng công tắc khóa súng**
- 9. Treo súng vào giá đỡ cẩn thận**
- 10. Khóa van bình khí đốt lạnh một cách chắc chắn**

[Type here]

VPĐD NIPON CORPORATION TẠI TPHCM
Lầu 3, Cao Ốc Tuổi Trẻ, 60a Hoàng Văn Thụ, P9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
ĐT : 028.38448172 FAX : 028.39971661