

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**BÀN SƯỞI ẤM SƠ
SINH**

MODEL: SUNFLOWER WARMER

HÃNG ATOM/NHẬT BẢN SX

VPĐD. NIPON CORPORATION TẠI TP.HCM
LẦU 3 – CAO ỐC TUỔI TRẺ, 60A HOÀNG VĂN THỤ, Q.PHÚ NHUẬN, TP.HCM
ĐT: 028.38448172 – Fax: 028.39971661

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÀM ẤM TRẺ SƠ SINH

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM

I. Nhiệt độ trong lồng sẽ hiển thị trong giới hạn 20 đến 42C với bước tăng là 0,1C .Thông báo “LO” (thấp) sẽ hiển thị từ 19,9C trở xuống .Và “HI” (cao) sẽ hiển thị nếu nhiệt độ cao 42,1C trở lên

-Nhiệt độ đặt cho không khí trong lồng có thể được chọn trong giới hạn 23 đến 37C với bước tăng là 1C .Nếu muốn đặt trong khoảng 37,1 đến 39C phải chọn Override

-Để đặt nhiệt độ hoặc thay đổi nhiệt độ không khí trong lồng nhấn phím điều khiển Manual (AIR) trong vòng 1 giây đèn chỉ thị AIR (chỉ thị Manual) bắt đầu sáng .Trong khi đèn này sáng nhấn các phím lên và xuống để chọn nhiệt độ đặt .Nếu đèn này tắt thì quá trình cài đặt sẽ kết thúc. Bộ gia nhiệt bắt đầu hoạt động

-Sau khoảng 50 đến 60 phút nhiệt độ trong lồng sẽ ổn định

-Chỉ thị mức độ gia nhiệt :chỉ thị này có 10 mức chỉ mức độ làm việc của bộ gia nhiệt (heater). Mức độ này càng cao thì nhiệt lượng tỏa ra càng nhiều

-Muốn đặt nhiệt độ trong lồng áp ở chế độ Override (nhiệt độ đặt từ 37,1 đến 39C)phải nhấn phím Override (>37C và >37,5C) sau khi nhấn phím chọn Manual (AIR) và trước khi chọn nhiệt độ

-Đặt em bé vào lồng : mở cửa trước và đặt em bé vào lồng một cách an toàn

-Theo dõi nhiệt độ da của em bé :phải gắn đầu dò theo dõi nhiệt độ da vào cho em bé (phải vệ sinh vùng da trước khi gắn)và đầu còn lại gắn lỗ bên phải của lồng .Sau khoảng 4 đến 5 phút nhiệt độ da của em bé sẽ ổn định. Nhiệt độ bình thường 30 đến 42C với bước tăng là 0,1C .Thông báo “LO” (thấp) sẽ hiển thị nếu nhiệt độ dưới 30C và “HI” (cao) sẽ hiển thị nếu nhiệt cao từ 42,1 C trở lên

II.Đặt nhiệt độ trên da cho em bé

- Thực hiện đặt nhiệt độ không khí trong lồng như trên, đợi nhiệt độ trong lồng ổn định và đặt em bé 1 vào lồng
- Gắn đầu dò theo dõi nhiệt độ da lên cho em bé ,và theo dõi nhiệt độ như phần trên
- Nhấn phím chọn điều khiển Servo (Skin) khoảng 1 giây để chuyển sang chế độ Servo .Đèn Skin nhấp nháy cùng lúc đó nhiệt độ đặt chuyển từ nhiệt độ không khí sang nhiệt độ da
- Để thay đổi nhiệt độ đặt nhấn các phím lên xuống để chọn .Khi đèn Skin không còn nhấp nháy nữa thì quá trình cài đặt đã hoàn thành và bộ gia nhiệt bắt đầu hoạt động
- Để chọn chế độ Override thực hiện tương tự như trên nhưng trước khi dung các phím lên và xuống để chọn nhiệt độ phải nhấn Override(>37C và >37,5C)khi đó nhiệt độ da được đặt từ 37,1 đến 39C

III.Điều khiển độ ẩm

- Mở nắp bình tạo ẩm và hạ nó xuống hết mức
- Lấy bình đựng nước tạo ẩm ra ngoài
- Mở bình nước và đổ đầy thêm bằng nước cất
- Đóng nắp lại và để nó vào vị trí cũ
- Gắn nắp he bộ tạo ẩm lại như lúc ban đầu
- Nhấn phím lựa chọn độ ẩm tương đối khoảng 1 giây ,mức độ ẩm tương đối được đặt bắt đầu nhấp nháy . Dùng các phím lên và xuống để đặt độ ẩm ,độ ẩm tương đối được đặt trong khoảng 40 đến 90 %. Độ ẩm tương đối sẽ đặt xong khi nó không còn nhấp nháy nữa .Khi độ ẩm tương đối là 40% mà tiếp tục nhấn phím mũi tên xuống nữa thì chữ OFF sẽ xuất hiện và bộ gia nhiệt sẽ không hoạt động
- Nước trong bình tạo ẩm sẽ bốc hơi và cạn dần đi sau 1 thời gian sử dụng .Nếu có chỉ thị báo thiếu nước trên mặt máy phải đổ đầy lại

Chương III: VỆ SINH – KHỬ TRÙNG – BẢO DƯỠNG

Chú ý :

- Phải chắc chắn là nguồn đã tắt và dây nguồn đã được tháo rời
- Phải để lồng áp và điện trở nhiệt nguội đi trước khi làm vệ sinh và khử trùng hệ thống .Nếu không có thể gây chập điện

Sản phẩm này chưa được tiệt trùng trong khi vận chuyển vì vậy trước khi sử dụng phải tiệt trùng hệ thống

- Phải đóng hệ thống cung cấp Oxy trước khi vệ sinh và tháo rời các đường ống cung cấp cho lồng hấp .Nếu không có thể gây nổ do Oxy o áp suất cao
- Phải vệ sinh lại trước khi sử dụng cho một em bé mới
- Khi phát hiện có vết bẩn phải tiến hành vệ sinh ngay

Dụng cụ và dung dịch dùng để vệ sinh

- Gồm vải mềm và dung dịch
- Dung dịch khử trùng gồm :
 - + 0,2 đến 0,5% dd Benzalkonium chloride
 - +0,2 đến 0,5% dd Benzethonium chloride
 - +0,1 đến 0,5% Chlohexidine

* Không được dùng vải cứng, alcohol, acetone hoặc các chất khác để vệ sinh