

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT DỊCH ÁP LỰC THẤP CONSTANT 1400 – SHIN-EI

- Đặt máy ở vị trí thấp hơn vị trí muốn hút dịch.
- Mở nắp của bình thông nhau và cho nước vào đến mức số 10, điều chỉnh thanh áp lực nước ở mức số 0. Đậy nắp bình thông nhau lại chắc chắn.
- Cắm nguồn và bật công tắc nguồn máy.
- Kiểm tra các nút đầu dây đảm bảo gắn chặt vào bình chứa dịch hút và bình thông nhau.
- Giữ nút điều chỉnh áp lực và bịt đầu dây hút để điều chỉnh mực áp lực nước.
- Điều chỉnh thanh áp lực ở mức cần thiết.
- Đặt đầu hút lên vị trí cần hút dịch.
- Điều chỉnh mức độ hút dịch mạnh hay yếu.

