

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy đo Thính lực
Model: AA-M1C

Hãng sản xuất : RION, Nhật Bản

Trước khi đo thính lực chúng ta phải kiểm tra xem dây kết nối nguồn với máy đã được gắn chặt hay chưa nếu dây bị lỏng thì gắn chặt lại rồi bật công tắc nguồn máy lên.

Khi bật công tắc nguồn, màn hình máy sáng lên và chúng ta bắt đầu tiến hành đo. Dưới đây là hình ảnh giải thích một số thuật ngữ ghi trên máy:

CLEAR: xoá dữ liệu

CANTREL: tạm dừng

AIR: đường khí

BONE: đường xương

EAR: R là tai phải, L là tai trái. (khi đo kết quả hiện thị bên phải sẽ là màu đỏ, bên trái màu xanh)


TRANSFER: truyền dữ liệu.

PRINT: in kết quả.

Chi tiết xin vui lòng xem clip hướng dẫn sử dụng:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZcqCENI7xwg&t=197s>

Đo đường
xương

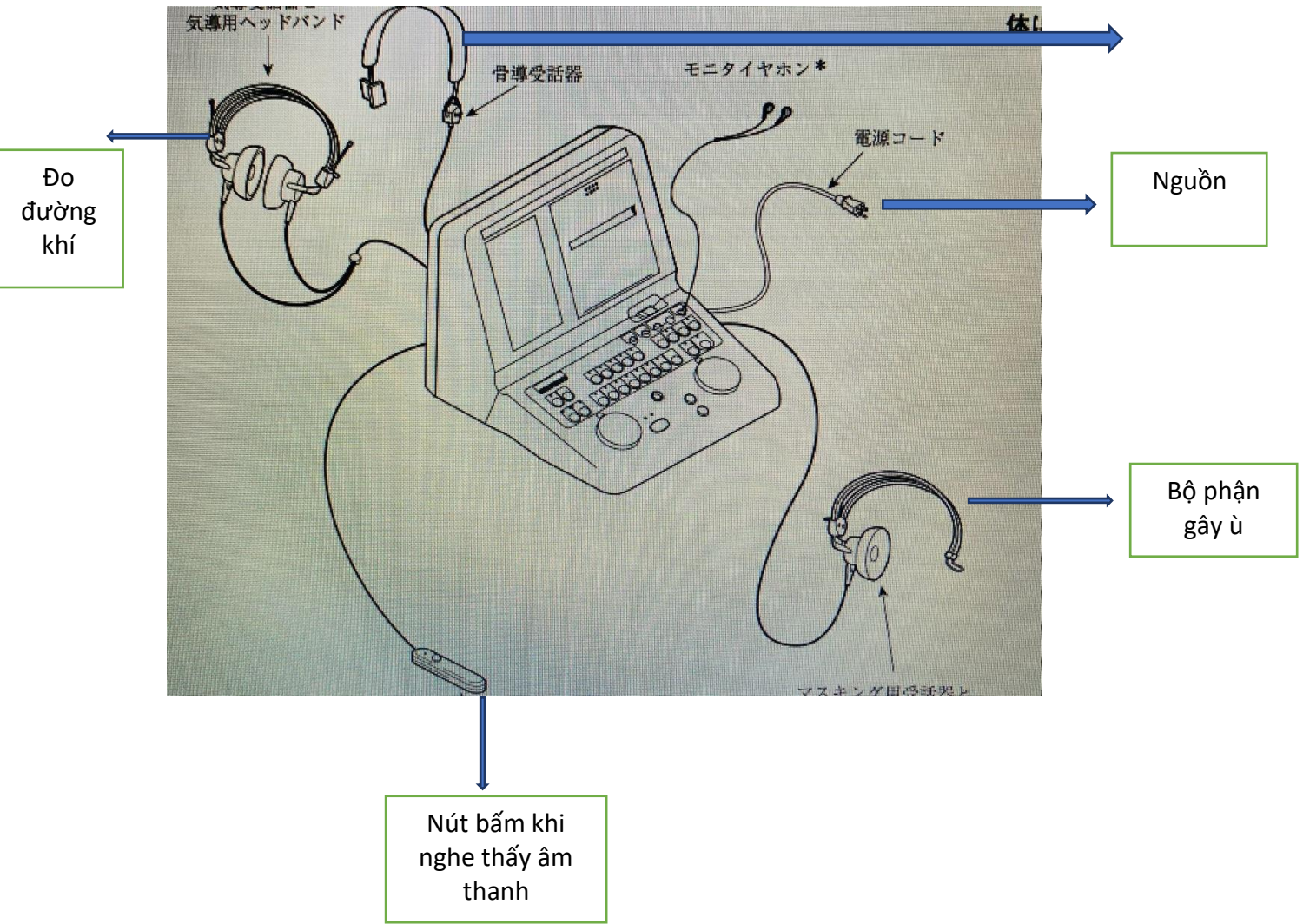



Mức độ âm thanh

Nút nguồn

Núm vặn tăng giảm âm thanh

Núm xác nhận kết quả